


アイソレーションガウン (ビニール)

切り取り穴③から簡単に破ることで頭を通さずに脱ぐことが出来る為衛生的です

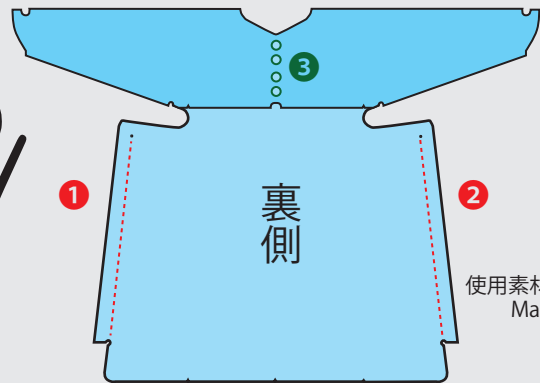

①②腰ひもの切り取り線 ③外す時の切り取り穴



使用素材: ポリエチレン
Made in Japan

着け方

ポイント

①と②の腰ひもを切り離す際引っ張らないように注意して下さい


⚠️ お取り扱い上のご注意
火のそばでは使用しないでください

①首の部分を持って首にかける

②親指穴に入れ袖を通す

③腰ひも①と②を切り取る

④腰ひもを後ろでクロスし前で結ぶ

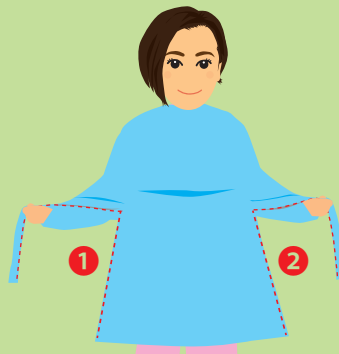

外し方

ポイント

表面は汚染してる可能性がある為触れないように脱いで下さい

①首の後ろにある③を持つ

②切り取り穴に沿って引っ張る

③手前に引き腰ひもを外す

④汚染面が内側になるように脱ぎ適当な大きさにまとめる

